

Xeragyn®

lavanda vaginale



Prodotto	XERAGYN LAVANDA VAGINALE Scatola, 4 flaconi monouso da 100 ml
Area	Ginecologia
Classificazione	Dispositivo Medico
Descrizione	Clinicamente testato, contiene un principio attivo di origine naturale (GPI colina) che ha dimostrato efficacia protettiva e lenitiva per l'intimo femminile. Il prodotto è in grado di dare un rapido sollievo ai fastidiosi sintomi di prurito, bruciore e rossore, che sono solitamente associati alle irritazioni intime femminili.
Shelf life	36 mesi
Conservazione	T < 25°; luogo fresco ed asciutto



Sintesi foglietto illustrativo

Xeragyn® lavanda vaginale con GPI Colina

Xeragyn® lavanda vaginale è particolarmente indicata per rimuovere residui organici o di farmaci che potrebbero predisporre all'insorgenza di stati infiammatori vaginali e infezioni batteriche o micotiche.

Xeragyn® lavanda vaginale contiene un innovativo principio attivo di origine naturale, il GPI Colina, purificato dai semi di girasole e brevettato, di dimostrata efficacia protettiva e lenitiva per le vie intime femminili. Il GPI Colina è un derivato di un componente fisiologico che interviene nei normali processi di regolazione delle vie intime femminili.

Grazie alla sua composizione, **Xeragyn® lavanda vaginale** è in grado di dare un rapido sollievo ai fastidiosi sintomi di prurito, bruciore e rossore solitamente associati alle irritazioni intime femminili.

Normalizzante della mucosa vaginale

MODALITÀ D'USO

Tenendo il flacone per l'anello, piegare il cappuccio fino a rottura del sigillo di sicurezza ed estrarre la cannula fino al suo arresto. Inclinare la cannula e inserirla delicatamente in vagina. Premere le pareti del flacone in modo da far defluire con regolarità il contenuto. Utilizzare un flacone al giorno per il periodo necessario (3-5 giorni) o un flacone al bisogno.

INGREDIENTI

Acqua depurata, glicole propilenico, diazolidinil urea, acqua distillata di malva, glicerosolfosoinositolo sale di colina, acido lattico, 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato.

PRECAUZIONI

Prodotto non adatto per l'utilizzo su mucose intime lese. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata ad uno dei componenti. **Xeragyn® lavanda vaginale** è un dispositivo medico clinicamente testato presso autorevoli istituti dermatologici.

CONFEZIONE

4 flaconi monouso da 100 ml e